


## Welche Schritte sind nötig, um RadiCS 5 von einem Rechner auf einen anderen Rechner umzuziehen?

### Vorbereitung des Umzugs:


Vergewissern Sie sich zunächst, dass RadiCS auf dem bisherigen Rechner geöffnet werden kann. Unsere Empfehlung: Aktualisieren Sie ggf. RadiCS auf dem bisherigen Rechner auf die gleiche Version, die Sie auf dem neuen Rechner nutzen werden.

### Durchführung des Umzugs:


1. Installieren Sie eine mit dem Betriebssystem compatible RadiCS Version auf dem alten Rechner. Infos dazu können sie über [support.de@eizo.com](mailto:support.de@eizo.com) erhalten.
2. Öffnen Sie RadiCS und melden sich im Administrator-Modus an.

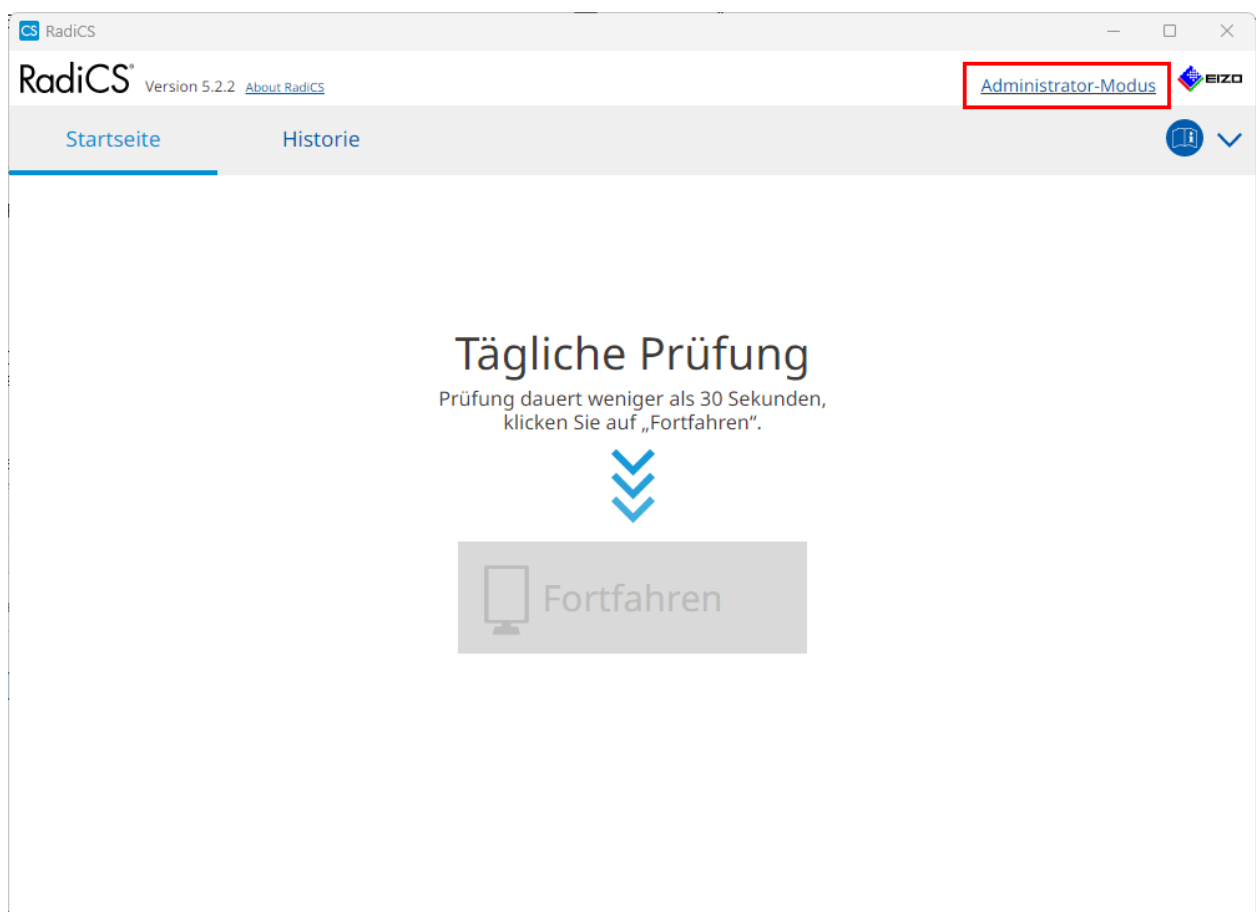


3. Gehen Sie auf Optionen->Konfiguration->Historie und deaktivieren den Haken bei „Backup der Historie ausführen“. Speichern und schließen sie RadiCS.

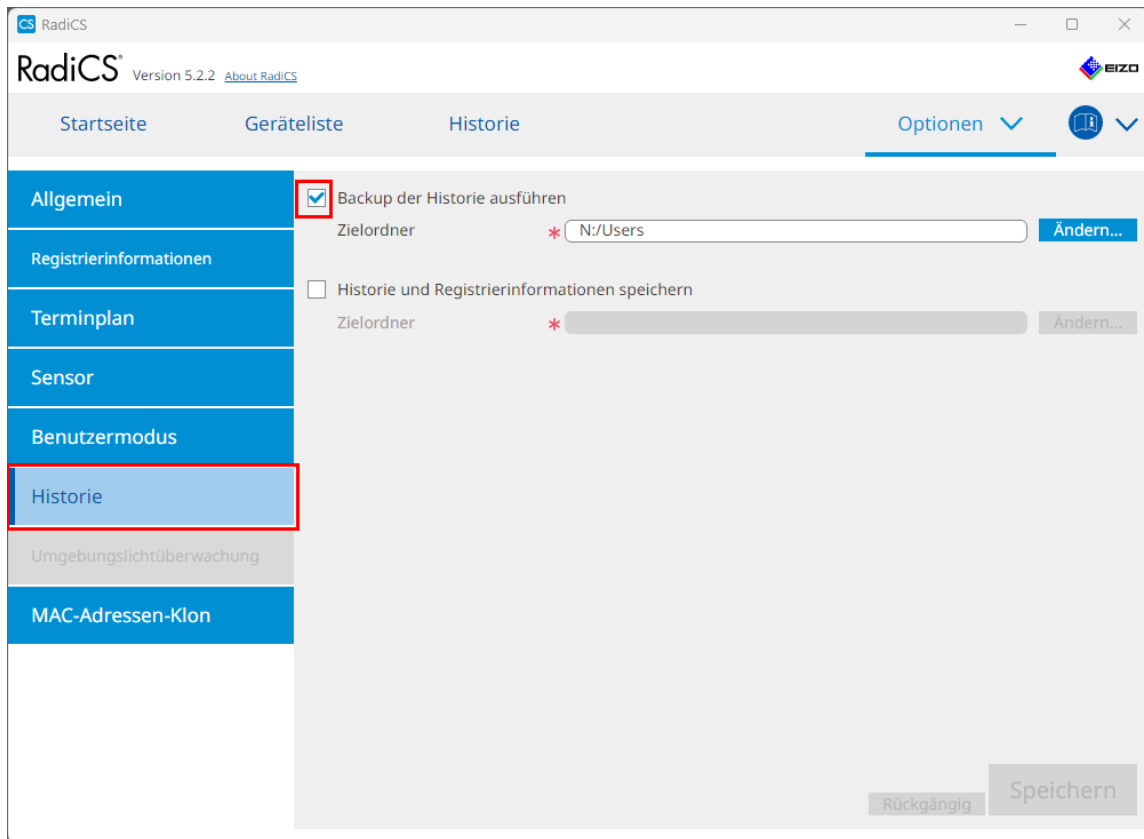


4. **RadiNET Pro User:** Bevor Sie die Datenbank/Backup Ordner des alten Rechners sichern, muss die Fernverwaltung deaktiviert werden. Erst danach sichern Sie den Backup Ordner.

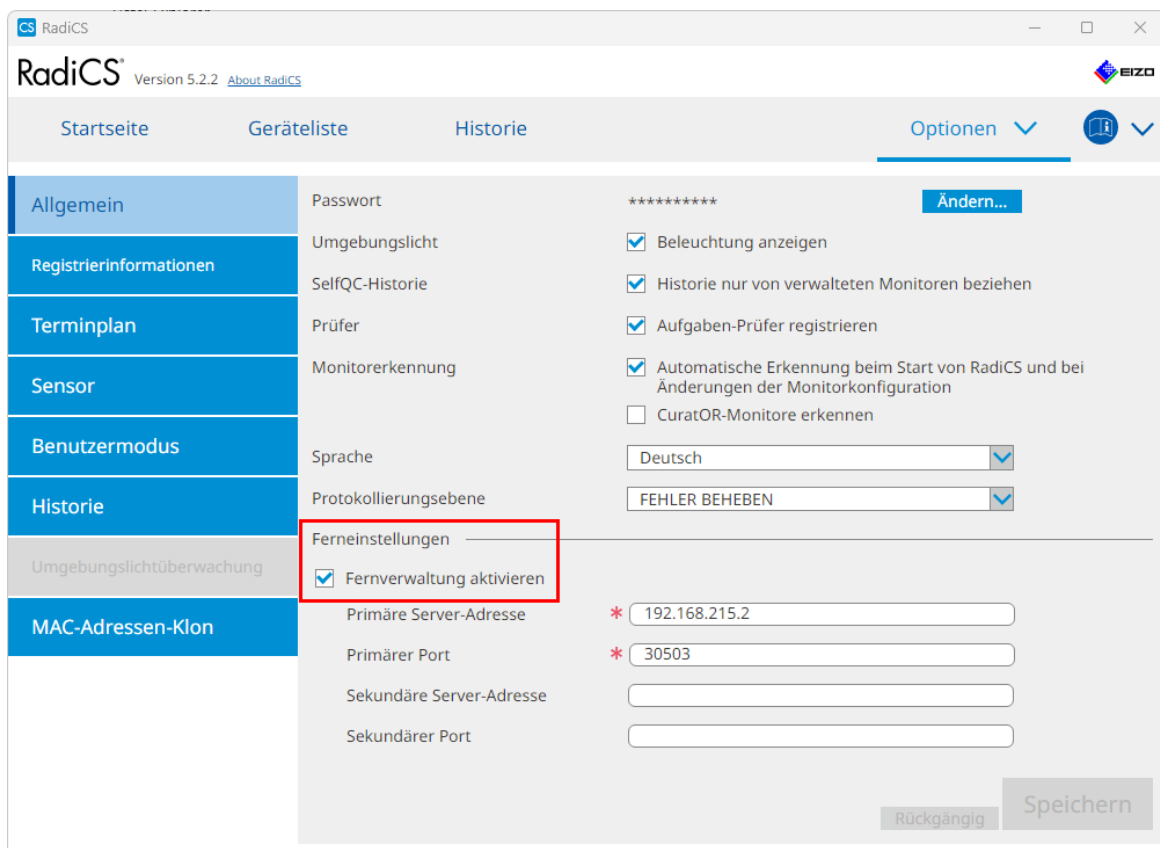

5. Kopieren sie den Backup-Ordner unter **C:\ProgramData\EIZO\RadiCS5** (verstecktes Verzeichnis) auf ein geeignetes Speichermedium oder Netzlaufwerk.

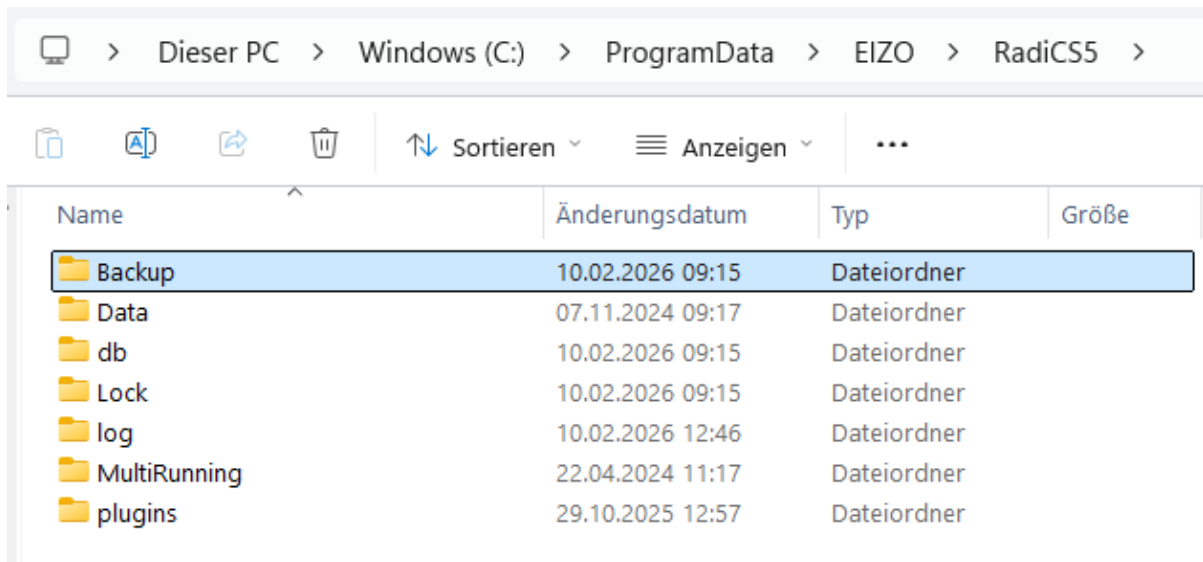


6. Installieren Sie die aktuelle RadiCS5 Version auf dem neuen Rechner (wenn Sie RadiNET Pro nutzen, muss sich die Datei RadiCSGatewaySettings.xml im Installationsverzeichnis von RadiCS befinden)
7. Nach der Installation öffnet sich RadiCS automatisch. Schließen Sie RadiCS zunächst. Halten Sie nun den RadiCS5Service unter Dienste auf dem neuen System an.

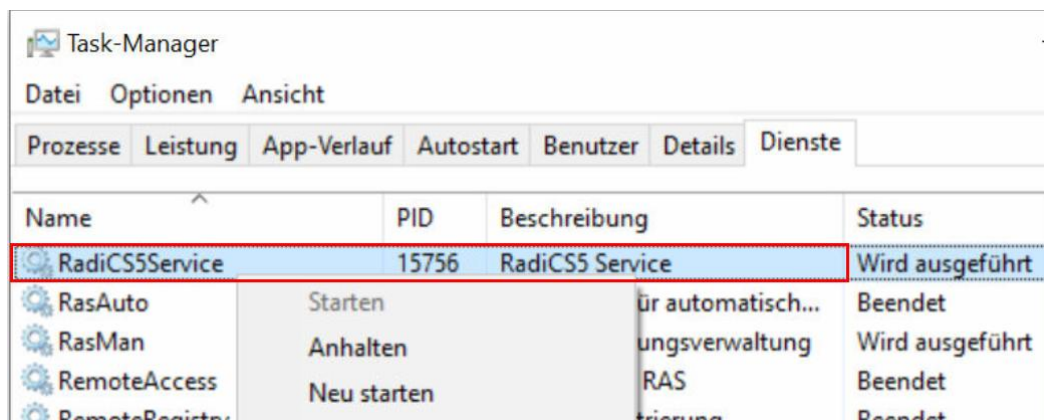


8. Benennen Sie den **db** Ordner im RadiCS5-Verzeichnis auf dem neuen Rechner in **\_db** um.




9. Kopieren sie den Backup Ordner des alten Rechners vom Speichermedium auf den Desktop des neuen Rechners. Entpacken Sie die letzte gespeicherte Datei und benennen diesen entpackten Ordner in **db** um. Beispiel:

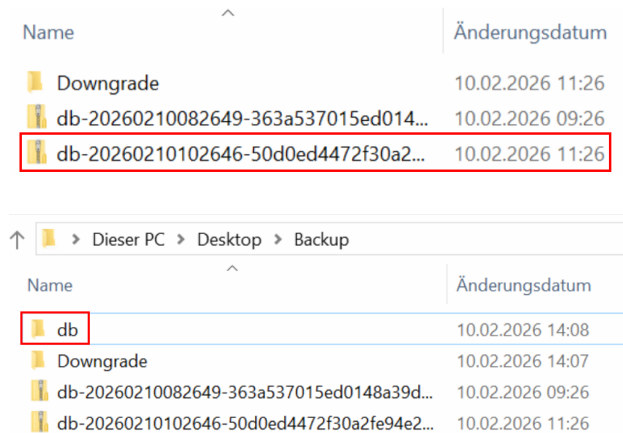


Kopieren sie nun diesen **db** Ordner in das RadiCS5 Verzeichnis <C:\ProgramData\EIZO\RadiCS5>.

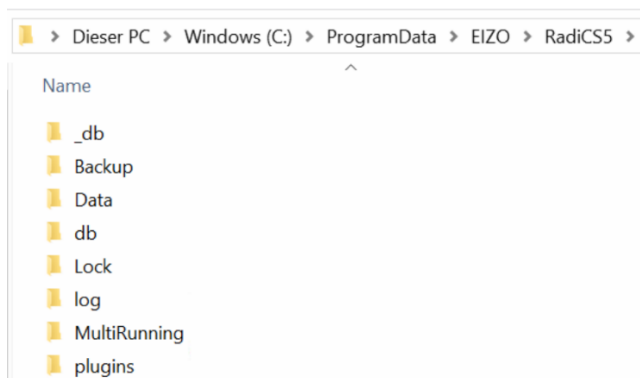


10. Starten Sie nun den Dienst RadiCS5Service.

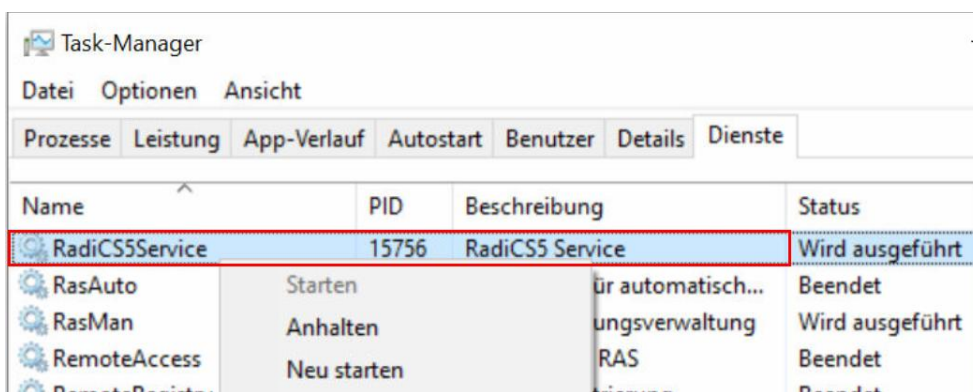

11. Öffnen Sie nun RadiCS5 und vergewissern Sie sich, dass alle Daten in der Historie wieder hergestellt sind. Setzen Sie danach den Haken zur Backup-Sicherung.

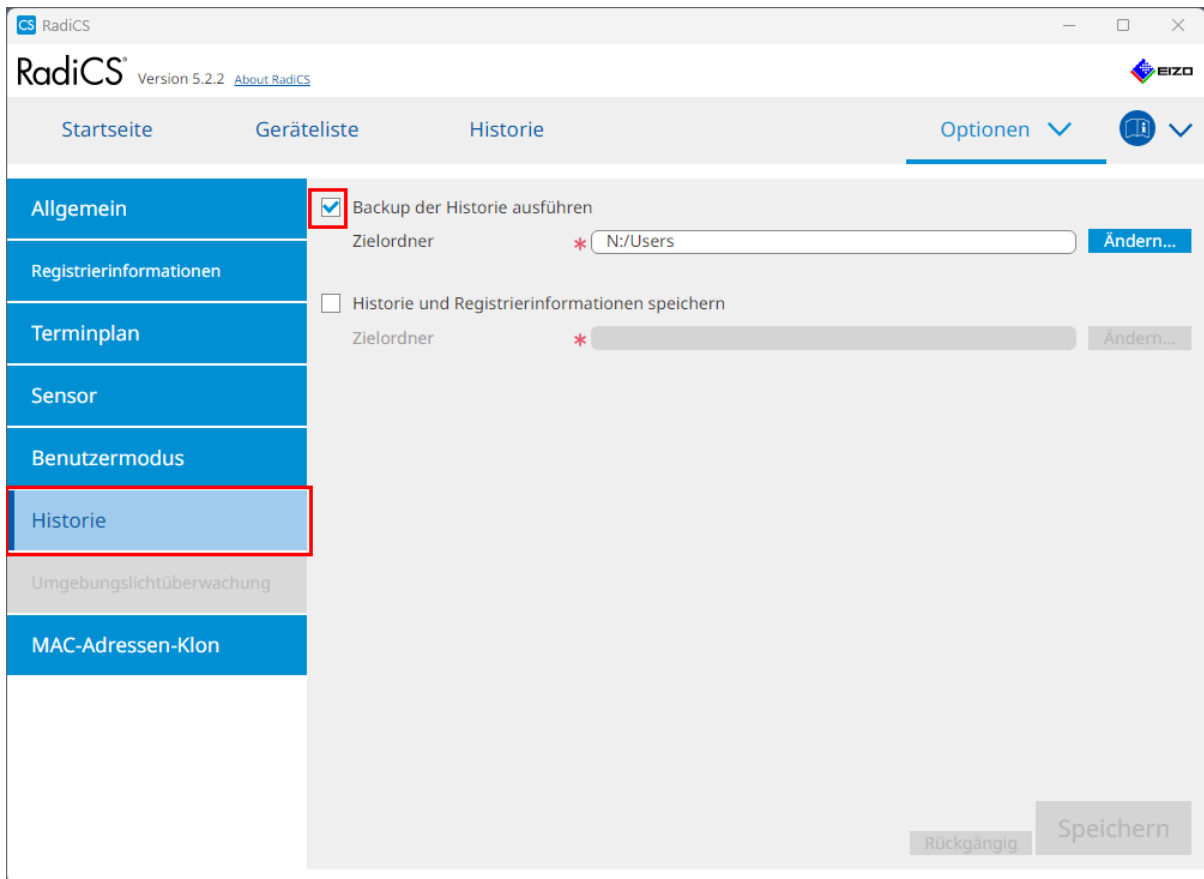

12. **RadiNET Pro User:** Schalten Sie die Fernverwaltung wieder ein.

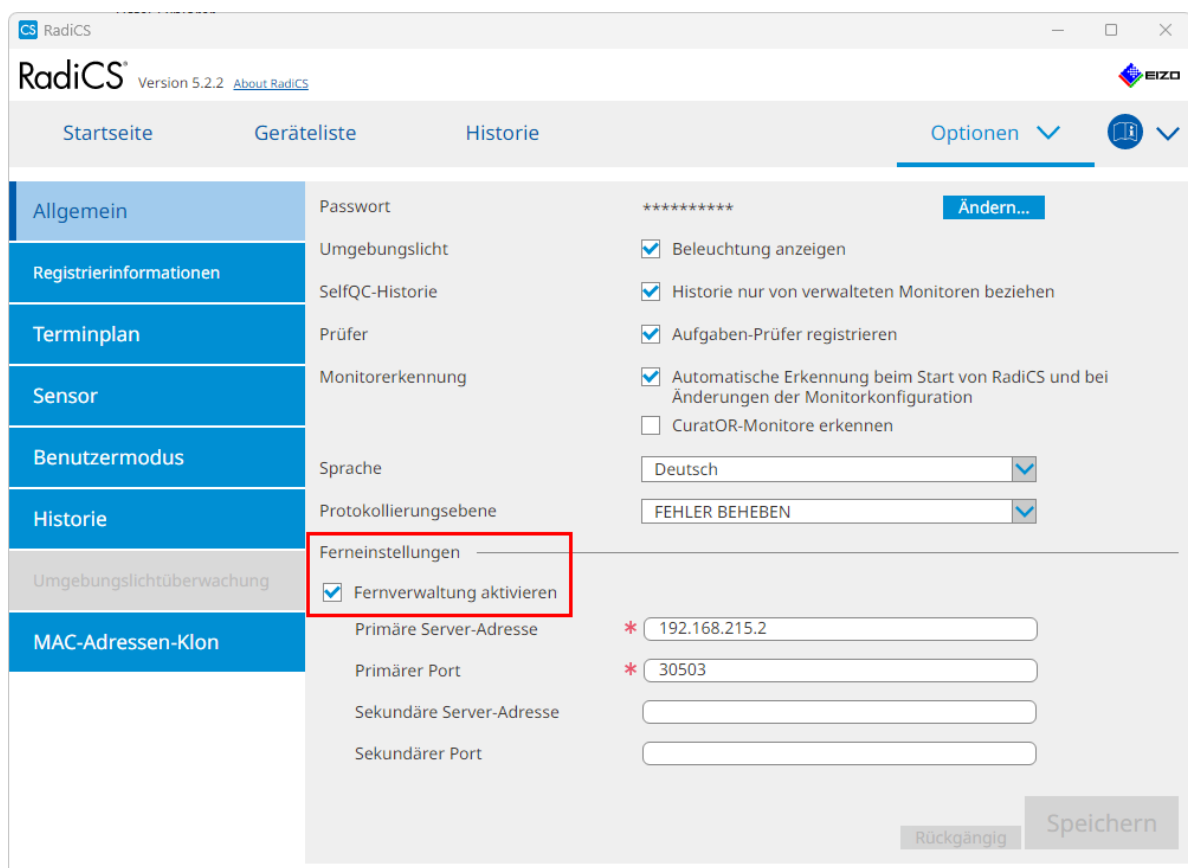

**13. Zum Schluss muss noch einmal der Umgebungslichtsensors korreliert werden.**

Eine Anleitung finden Sie im Handbuch unter Kapitel 5.8 Durchführen einer Korrelation des Umgebungslichtsensors.

14. Führen Sie nun eine Konstanzprüfung durch.

Sollten Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Support:

[support.de@eizo.com](mailto:support.de@eizo.com)